


TT1

series

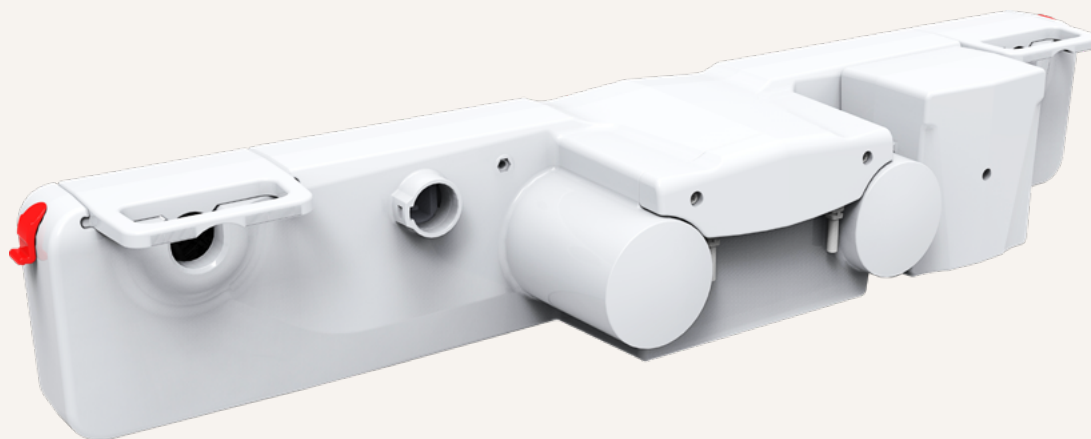

產品分類

• 醫療應用


TT1是TiMOTION (第一傳動) 所開發的船型馬達產品，主要用在居家醫護環境中。TT1的電子式控制符合大部份國家的電壓要求。內建開關型電源模組，具備小於0.5W的待機功耗。TT1擁有簡潔而成熟的外觀設計，其優越的機構穩定性適用於居家護理床。

產品特色

最大負載	6,000N (推力)
滿載時最快速度	4.6mm/s
空載時最快速度	6.8mm/s
安裝孔間距	581mm
防水等級	IPX6
安規認證	IEC60601-1-2
行程	背部87mm，腳部69mm
電壓	100V AC，100~240V AC
顏色	象牙白
適用於居家醫療床和照護病床應用	
備用電池 (選配)	


工程圖

標準尺寸
(mm)

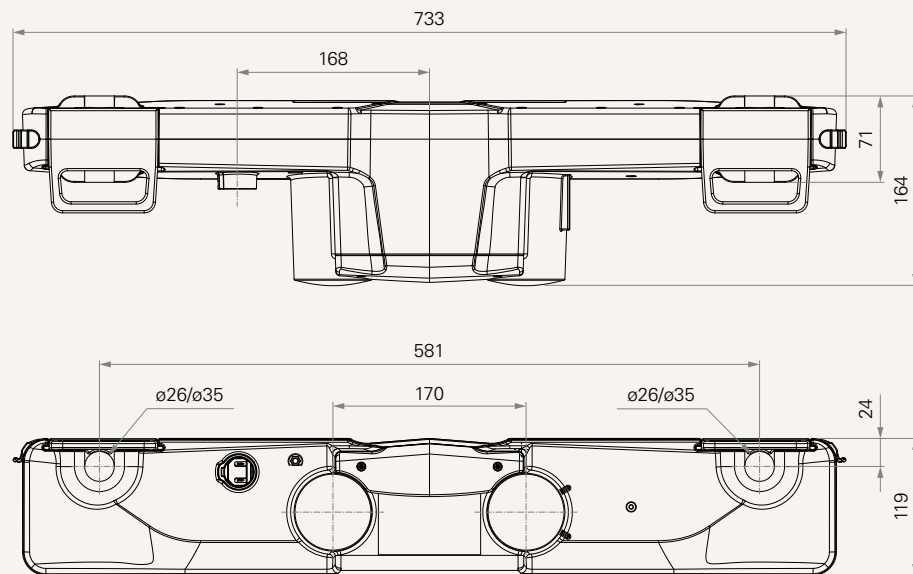


負載與速度

代碼	負載 (N)		額定負載下 伸出電流 (A)	伸出速度 (mm/s)	
	推力	拉力		空載 32V DC	負載 24V DC
馬達轉速 (2600RPM, Duty Cycle 10%)					
D	6000	0	3.5	5.2	3.5
馬達轉速 (3400RPM, Duty Cycle 10%)					
B	6000	0	3.5	6.8	4.6

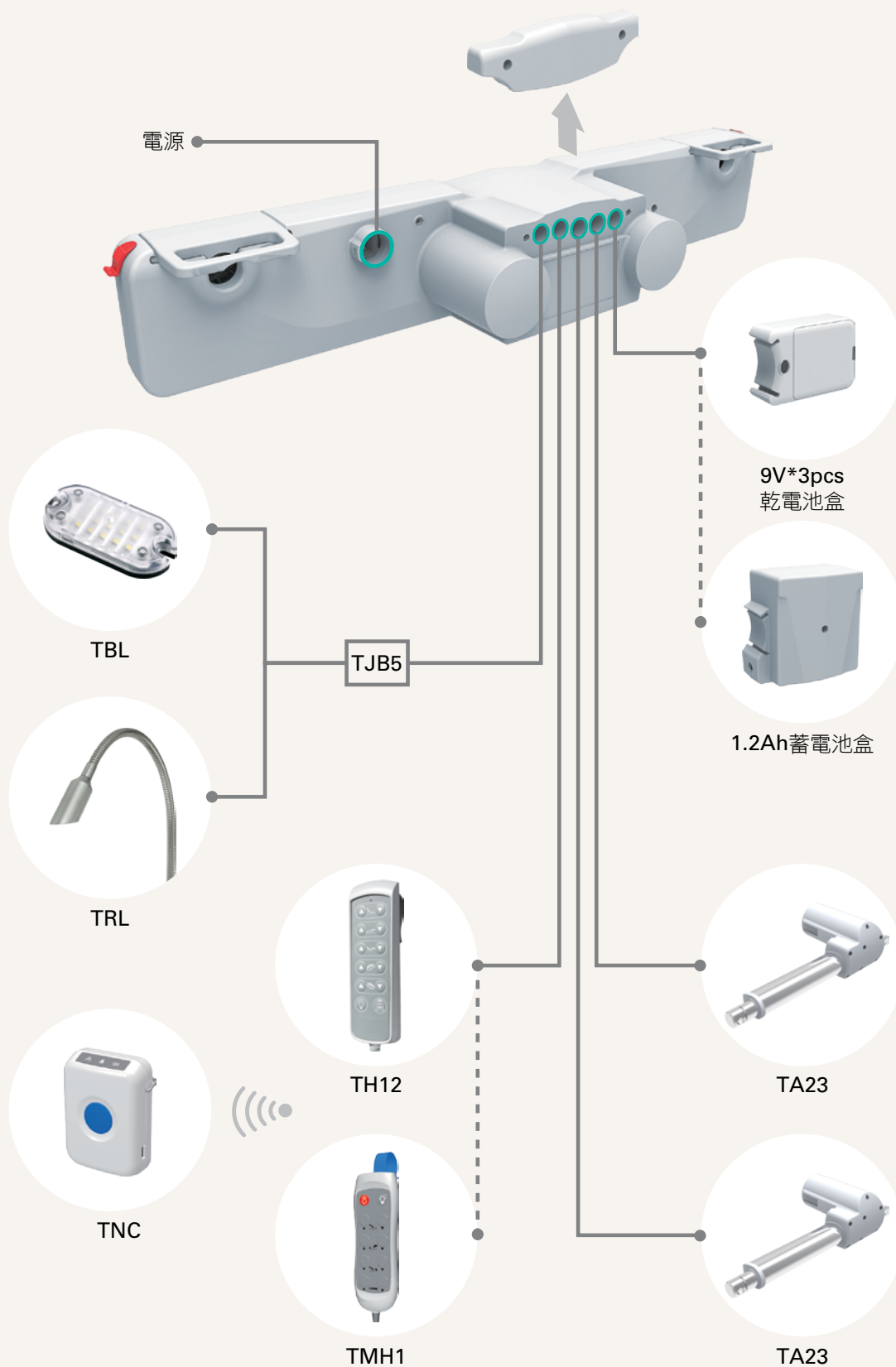


安裝指南


1 解除兩側安全鎖，取下固定帽

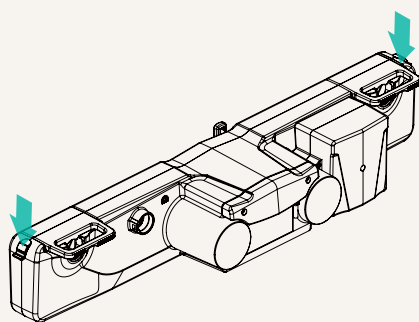


2 取下兩側上蓋

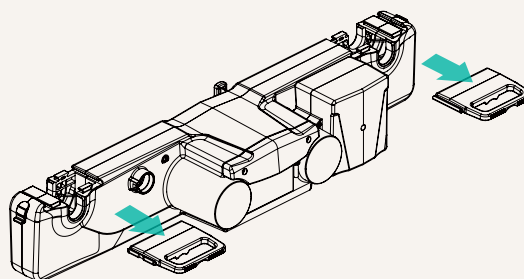

3 安裝TT1至床架上

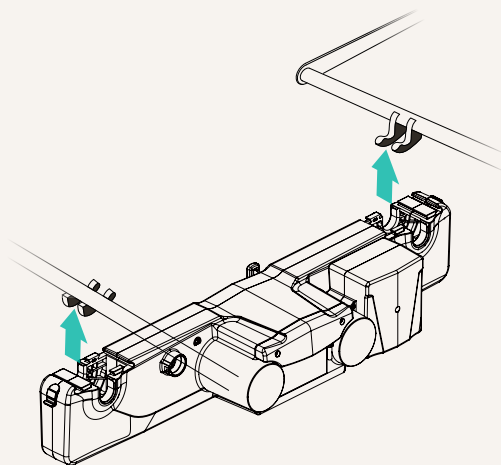

4 裝上兩側上蓋

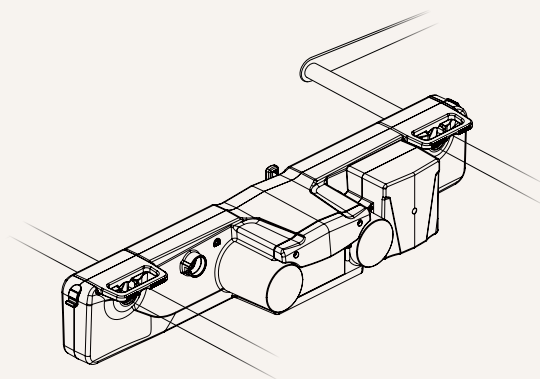

TT1

Version: 20220311-M

輸入電壓	1 = 100V AC	4 = 100~240V AC	
馬達	2 = 24V		
負載與速度	參照頁2		
插頭	1 = 歐規 2 = 美規	3 = 澳規 4 = 英規	5 = 日規
安裝孔尺寸 (mm)	1 = Ø26	2 = Ø35	
行程 (mm)	1 = 背部87，腳部69		
顏色	2 = Pantone 428C		
IP等級	1 = 無	2 = IPX6	
快速釋放	0 = 無		
內置馬達信號選項	0 = 無		
額外可接馬達數	0 = 0	1 = 1	2 = 2
手控器接口	1 = 1	2 = 2	
線長 (mm)	2 = 直線，4000		
接地	0 = 無	1 = 有	
變壓器	2 = SMPS (2.5A)	4 = Toroidal (4A)	5 = Toroidal (5A)
備用電池功能	0 = 無	1 = 9V*3乾電池盒	2 = 1.2Ah蓄電池盒

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出之任何產品的權力。